




KOD KATALOGOWY	4ARMY-SK-10
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ 4ARMY-SK-10
CODE	4ARMY-SK-10
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT 4ARMY-SK-10

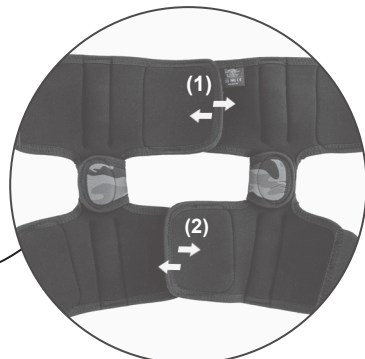

- 1. PL:** Rozepnij ortezę i poluzuj tylne pasy.
EN: Unfasten the brace and loosen the rear straps.

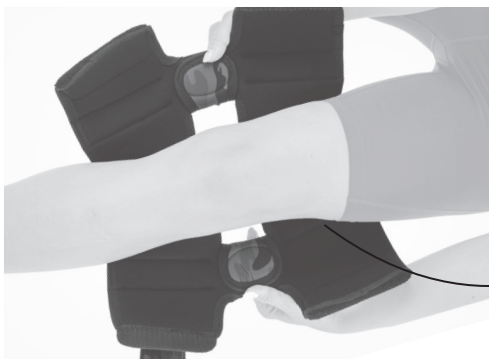

- 2. PL:** Przed zapięciem ortozy zegary powinny być ustawione dokładnie po bokach stawu kolanowego. Regulacji dokonujemy za pomocą tylnych zapięć (1,2).
EN: Before fastening the brace, the drop locks should be positioned exactly on the sides of the knee joint. Adjustments are made using the rear fasteners (1,2).

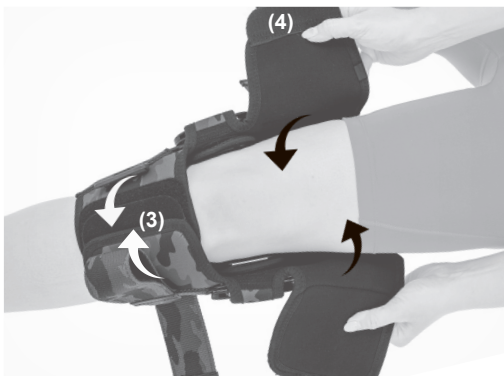

- 3. PL:** Załóż ortezę na nogę i zapnij rzepy według numeracji (3,4).
EN: Put the brace on the leg and fasten the Velcro straps according to the following steps (3,4).



4. PL: Przepleć pasy przez klamerki i zapnij na rzepy według podanej kolejności (5,6,7,8).

EN: Interlace the belts through the buckles and fasten them with Velcro in the order given (5,6,7,8).



5. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.