

KOD KATALOGOWY	4ARMY-B-01
NAZWA HANDŁOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ 4ARMY-B-01
CODE	4ARMY-B-01
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	UPPER-EXTREMITY SUPPORT 4ARMY-B-01



PL: ORTEZA BARKU
EN: SHOULDER BRACE



- 1. PL:** Rozepnij ortezę i poluzuj paski. Umieść ortezę na ramieniu.
EN: Unfasten the brace and loosen the straps. Place the brace on your shoulder.




- 2. PL:** Zapnij rzep ramienny (1).
EN: Fasten the shoulder Velcro (1).




- 3. PL:** Umieść osłonę (2) pod pachą.
EN: Place the cover (2) under your armpit.



- 4. PL:** Zapnij klamrę zatrzaskową (3) i za pomocą regulatora (4) ustaw odpowiednią długość taśmy.
EN: Fasten the snap buckle (3) and use the adjuster (4) to set the appropriate strap length.

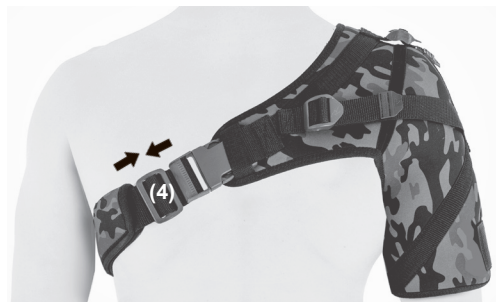

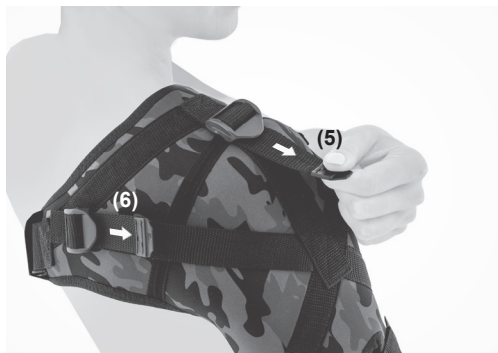

- 5. PL:** Za pomocą pasów naramiennych (5,6,7) ustaw ramię w pożądanej pozycji.
EN: Use the rotator cuff straps (5,6,7) for keeping the arm in the required position.



- 6. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.